

NOME DO PRODUTO: DRENO DE TÓRAX EM SILICONE - FOYOMED

Número ANVISA: 10150470498

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Drenos

Matéria Prima: Silicone

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Dreno torácico fabricado em silicone translúcido nos tamanhos 12 a 36 french, com um orifício central e 5 laterais. Ponta atraumática que proporciona **maior conforto ao paciente**, possui tarja radiopaca para localização do dreno no tórax. O Dreno para sucção de Tórax Foyomed é fornecido junto com seu conector.

INDICAÇÃO DE USO

Para drenagem pós-operatória cardiororácica e torácica. É um tubo de silicone inserido através da parede do tórax e no espaço pleural ou mediastino. Ele é utilizado para remover o ar (pneumotórax) ou líquido (derrame pleural e sangue), ou pus (empiema) a partir do espaço intratorácico.


INSTRUÇÃO DE USO

- Verificar se a embalagem está aberta ou danificada antes de utilizar;
- Abra o pacote e retire o dreno torácico utilizando uma técnica estéril. -
- Os produtos incluem uma bainha de embalagem que deve ser removido do dreno antes da utilização;
- Os usuários devem estar aptos aos procedimentos cirúrgicos torácicos e técnicas antes de utilizar dreno torácico;
- A técnica de inserção, localização e tamanho do dreno deve ser executada de acordo com a prática médica para otimizar a eficiência da drenagem.
- Cuidados devem ser tomados quando se insere o dreno torácico para evitar a perfuração do pulmão e\ou outros órgãos;
- O dreno torácico deve ser fixado adequadamente no local para evitar desalojamento acidental ou remoção;
- Tubos de conexão do paciente, local inserção e de permeabilidade devem ser verificados regularmente para confirmar o funcionamento adequado;
- Devem ser tomados cuidados durante a remoção do dreno do paciente para evitar danificar o dreno;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Segue normas técnicas ISO 13485.

Apresenta 6 furos, sendo 1 furo central e 5 furos laterais

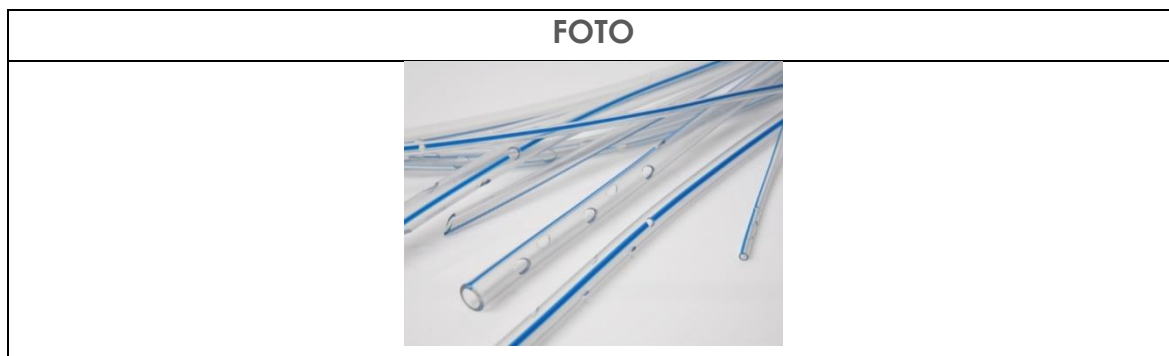

*Isento de látex.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO
DT1050	Dreno de Torax Radiopaco 10FR	40cm
DT1250	Dreno de Torax Radiopaco 12FR	40 cm
DT1450	Dreno de Torax Radiopaco 14FR	40 cm
DT1650	Dreno de Torax Radiopaco 16FR	40 cm
DT1850	Dreno de Torax Radiopaco 18FR	40 cm
DT2050	Dreno de Torax Radiopaco 20FR	40 cm
DT2250	Dreno de Torax Radiopaco 22FR	40 cm
DT2450	Dreno de Torax Radiopaco 24FR	45 cm
DT2650	Dreno de Torax Radiopaco 26FR	45 cm
DT2850	Dreno de Torax Radiopaco 28FR	45 cm
DT3050	Dreno de Torax Radiopaco 30FR	45 cm
DT3250	Dreno de Torax Radiopaco 32FR	45 cm
DT3450	Dreno de Torax Radiopaco 34FR	45 cm
DT3650	Dreno de Torax Radiopaco 36FR	45 cm
DT3850	Dreno de Torax Radiopaco 38FR	45cm
DT4050	Dreno de Torax Radiopaco 40FR	45cm

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O Dreno Torácico Silicone Foyomed é fornecido embalado unitariamente em envelope de papel grau cirúrgico.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em temperatura ambiente

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Doença hemorrágica, disfunção cardiopulmonar;
- Coagulopatia refratária e presença de hérnia diafragmática, bem como hidrotorax hepático, cicatrizes no espaço pleural.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br