

**NOME DO PRODUTO: BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO
QUADRADO - WILTEX**

Registro MS: 10150470600

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Bolsas Coletoras

Método de Esterilização: **óxido de etileno**

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Bolsa coletora com capacidade de 2.000ml com escalas de graduação a partir de 25 ml, para pequenos e grandes volumes, ponto de coleta para amostra e tampa protetora, tubo extensor, alça de sustentação cordão, pinça corta fluxo, válvula anti refluxo, coldre para acomodação do tubo de saída, tubo de drenagem com válvula, Câmara de Pasteur, clipe de beira de cama, filtro de ar hidrófobo e bacteriológico.

INDICAÇÃO DE USO

A Bolsa de Drenagem de Urina Sistema Fechado Wiltex é usada com cateter urinário para a coleta de urina e em casos de incontinência urinária, em pacientes acamados por longo período de tempo, problemas para urinar ou que necessita ter fluxo de urinário continuamente.

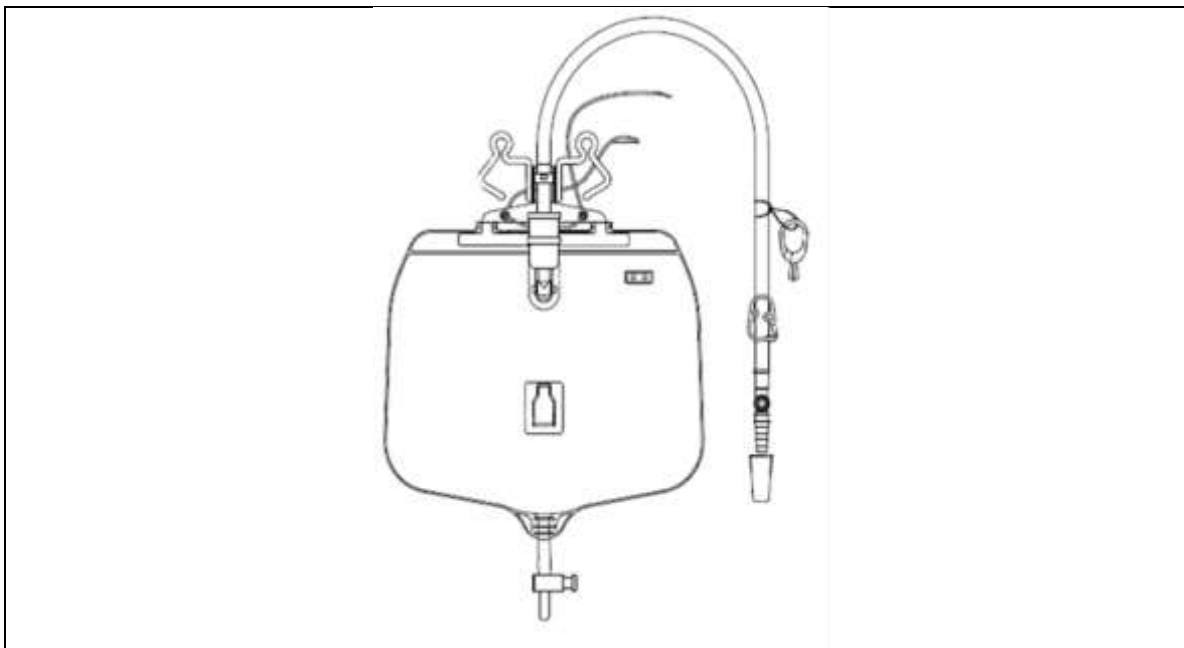
INSTRUÇÃO DE USO

- Abra a embalagem de forma asséptica e retire a bolsa de drenagem de urina.
- Assegure a conexão entre a bolsa e o tubo de conexão.
- Conecte a bolsa coletora ao cateter urinário.
- Para realizar a troca da bolsa de drenagem de urina, seguir protocolo da instituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	Composição
Tampa protetora	Polietileno (PE)
Ponta de coleta amostra	Cloreto de polivinila (PVC)
Clipe beira de cama	Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (ABS)
Elástico	Elastómeros Termoplásticos
Clamp/clip	Polióxido de metileno (POM)
Tubo extensor	Cloreto de polivinila (PVC)
Alça	Polipropileno (PP)
Cordão/cadarço locomoção	Tecido
Bolsa coletora	Filme de Cloreto de polivinila (PVC)
Válvula anti refluxo	Cloreto de polivinila (PVC) / Poliamida (PA)
Câmara de Pasteur	Cloreto de polivinila (PVC)
Filtro de ar	Poliamida (PA)
Coldre	Cloreto de polivinila (PVC)
Tubo de drenagem com válvula	Cloreto de polivinila (PVC) / Polipropileno (PP) / Polietileno (PE)

FOTO

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

Código	Descritivo
KBN103	BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML MODELO QUADRADO - WILTEX

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalado individualmente e esterilizado em Óxido de Etileno

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e Transportar em ambiente seco, bem ventilado, a uma umidade relativa inferior a 80%, gases não corrosivos e afastado de luz solar.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Uso único, descartar após o uso.
- Proibido reprocessar.
- Estéril a óxido de etileno.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

- Não usar após a data de validade.
- Não re esterilizar ou reutilizar.
- Manter o produto em local seco, fresco e escuro.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259