

NOME DO PRODUTO: CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO - BAIHE

Registro MS: 10150470527

Registro MS: 10150479081 (*modelo Plus*)

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Conectores e Conexões

Matéria Prima: Corpo em Policarbonato e Membrana em Borracha de Silicone

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Conector valvulado sistema fechado, corpo confeccionado em policarbonato totalmente transparente e membrana de silicone, conexão luer lock para fixar dispositivos intravenosos. Dispositivo de acesso sem agulha, aceita seringas bico luer slip e bico luer lock, compatível com Ressonância Magnética (exceto modelo de pressão positiva no código FL-NF01PS).

INDICAÇÃO DE USO

O conector valvulado é um dispositivo indicado para uso em cateteres centrais e periféricos diminuindo o risco de infecções associado ao uso dos dispositivos pois mantém seu sistema fechado.

INSTRUÇÃO DE USO

- Realizar antissepsia do hub do cateter e/ou do extensor;

- Abrir a embalagem do dispositivo na técnica asséptica;
- Conectar o dispositivo valvulado sistema fechado BAIHE ao hub do cateter/extensor;
- Realizar a antisepsia na ponta do dispositivo antes e depois do uso;
- O conector valvulado deve ser trocado de acordo com o tempo de permanência do cateter. Exceto quando houver presença de sangue no dispositivo, nesse caso o mesmo deverá ser trocado imediatamente;
- O prazo para troca não deve ser mais de 30 dias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão Negativa:

Espaço morto: 0,01ml

PSI: 300 PSI

Fluxo em Gravidade: 200ml/min

Comprimento: 22mm

Pressão Positiva:

Espaço morto: 0,01ml

PSI: 300 PSI

Fluxo em Gravidade: 300ml/min

Comprimento: 35mm


Pressão Neutra:

Espaço morto: 0.085ml

PSI: 200PSI

Fluxo em Gravidade: 170ml/min

Comprimento: 28mm

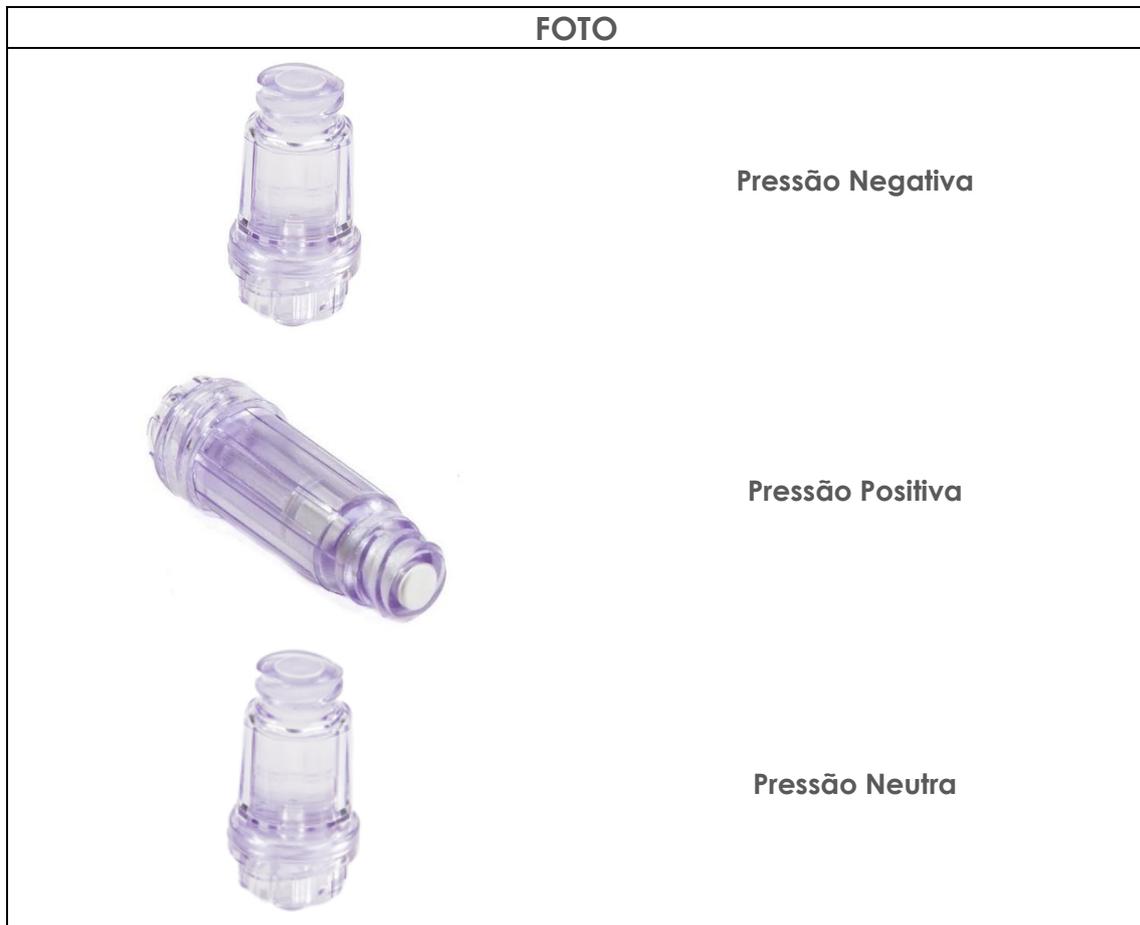

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FL-NF01NG	CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO BAIHE – NEGATIVO
FL-NF01NT	CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO BAIHE - NEUTRO
FL-NF01PS	CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO BAIHE – POSITIVO
FL-NF01NGC	CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO COM TAMPA BAIHE – NEGATIVO
FL-NF01NTC	CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO COM TAMPA BAIHE – NEUTRO
FL-NF01PNC	CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO PLUS COM TAMPA BAIHE – POSITIVO

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalagem individual em envelope termoselado de Tyvek e PE/PP, caixa com 50 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local seco e arejado.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Uso único;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259