

**NOME DO PRODUTO: MÁSCARA DE ANESTESIA EM SILICONE – FOYOMED**

Registro MS: 10150470582

**DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Máscaras

Matéria Prima: Silicone

Método de Esterilização:

Produto Estéril: ( ) Sim ( x ) Não

Validade: 5 anos

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

A Máscara de Anestesia FOYOMED é toda fabricada em Silicone com conector acoplável a junção 15 / 22 mm. Possui modelo Oval e Redondo para tamanho neonatal e infantil.

**INDICAÇÃO DE USO**

É aplicável para uso junto ao reanimador manual ou qualquer outra conexão ventilatória com junção 15 / 22 mm

**LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO**

- Lave a máscara em água < 35° e detergente, enxague com água corrente e seque;
- Efetue a esterilização em autoclave a Vapor à 121°C por 20 minutos ou 134°C por 15 minutos.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COM GANCHOS 4 PONTOS
LB303000	Máscara de anestesia Oval em Silicone - Foyomed	Neonatal	Não Possui
LB303001	Máscara de anestesia Oval em Silicone - Foyomed	Infantil	Não Possui
LB303002	Máscara de anestesia Oval em Silicone - Foyomed	Pediátrica	Possui
LB303003	Máscara de anestesia Oval em Silicone - Foyomed	Adulto Pequeno	Possui
LB303004	Máscara de anestesia Oval em Silicone - Foyomed	Adulto Médio	Possui
LB303005	Máscara de anestesia Oval em Silicone - Foyomed	Adulto Grande	Possui
LB303100	Máscara de anestesia Redonda em Silicone - Foyomed	Neonatal	Não Possui
LB303101	Máscara de anestesia Redonda em Silicone - Foyomed	Infantil	Não Possui
LB303102	Máscara de anestesia Redonda em Silicone - Foyomed	Pediátrica	Possui

**FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM**

Embalagem individual

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Manter em temperatura ambiente

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

Manter em 18°C a 50°C.

**Importado e Distribuído por:**

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: [www.cfernandes.com.br](http://www.cfernandes.com.br)

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259